

# Brukerveiledning for å koble til Ecocuff/Softcuff mansjetter

Til bruk mot Welch Allyn ABPM 7100 og MobiloGraph

Art.nr.: 5082-174  
1 stk



Art.nr.: 5082-164  
2 stk



Art.nr.: WAPORT-1  
1 stk



Det er ikke nødvendig å kjøpe en ekstra slange, man bruker den som er på blodtrykksmansjetten. Kutt slangen ca 10 cm fra mansjetten og fest kobling 5082-164 på mansjettsiden.



Kutt av en bit på ca 3 cm av slangen som er festet til apparatet. På den ene siden setter du en WAPORT-1, på den andre enden en kobling 5082-164. På den slangeenden som er igjen, der enden er festet til apparatet, kobles 5082-174 på den andre enden.



## Til bruk mot Welch Allyn ABPM 6100

Koblinger pluss slange:

Art.nr.: 5082-164  
2 stk



Art.nr.: WAPORT-1  
1 stk



Art.nr.: WA5082-189  
1 stk slange 35 cm  
(bør kappes ned til  
ca. 3 cm og brukes)



For WA 6100, bruk kobling 1-SC:

