




Instruksjon for bruk av de nye Eurotrol kontrollflaskene Hemotrol - Glucotrol NG - Albutrol

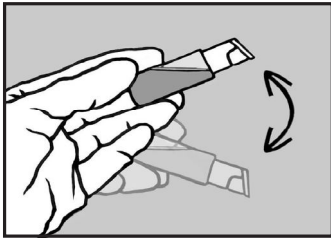


- 1 Bland flaskens innhold forsiktig 8-10 ganger

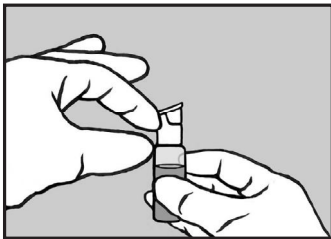


- 2 Hold flasken rett opp og knips korken bestemt flere ganger for å sikre at det ikke ligger noe kontrollvæske igjen i dråpetuten.

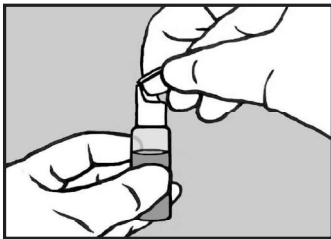


- 3 Åpne opp flasken ved å dra korken opp.

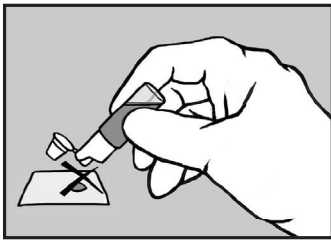

- 4 Ikke fyll kyvetten direkte fra flasken. Legge en dråpe med kontrollmateriale på et hydrofobt underlag, for eksempel en plastfim. Ikke bruk den første dråpen.

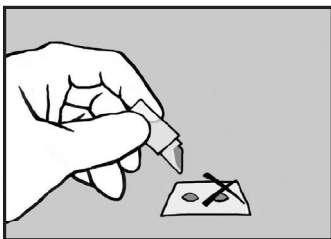

- 5 Fyll kyvetten ifølge produsentens anvisning. Legg kyvetten i instrumentet for analysering.

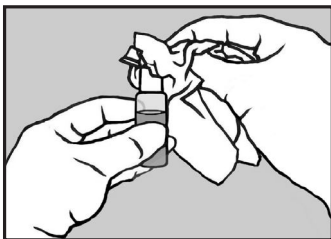

- Etter hver bruk, tørk av overflødig kontrollmateriale fra dråpetuten og fra korken, med et rent tørkepapir. Klikk korken tilbake på dråpetuten så flasken er tett.
- 6

