


## Blodgassprøyte Pro-Vent® med EDGE™ sikkerhetsskjold og Filter-Pro® beskyttelseshette for eliminering av luftbobler


### 1. Forberede sprøyten

- Forhåndsinnstill stempelet til ønsket volum. [fig 1]

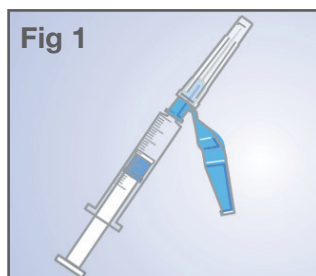


### 2 Sikre kanylen

- Se til at EDGE™ sikkerhetsskanyle er ordentlig fastsatt på sprøyten med en lett vridende bevegelse. [fig 2]
- Kanylens «øye» er rettet oppover når beskyttelseshetten er i posisjon «klokken tre».
- For å fjerne kanylebeskyttelsen trekker du denne rett ut fra kanylen.

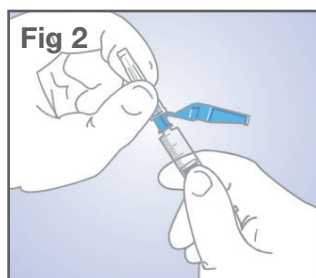


### 3 Prøvetaking

- Før kanylen inn i arterien og se etter blodsvar [fig 3]. Fyll sprøyten til ønsket blodmengde. Fjern kanylen og sikre punksjonsområdet etter lokale forskrifter.

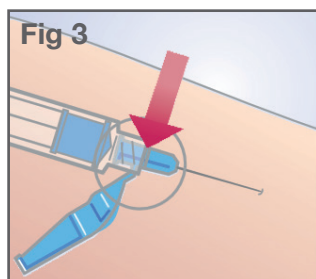


### 4 Aktivere sikkerhetsmekanismen

- Med etthåndsgrep aktiveres sikkerhetsmekanismen mot et flatt underlag slik at kanylen fester seg ordentlig til beskyttelseshetten [fig 4]

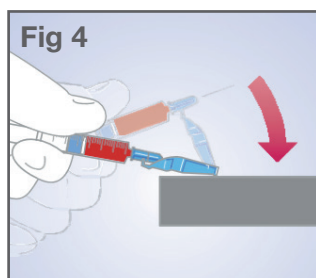


### 5 Etter bruk

- Fjern beskyttelseshetten og kast denne i en godkjent beholder for stikkende/skjærende avfall. [fig 5]

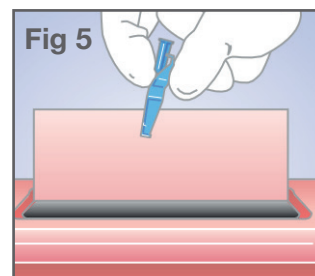


### 6 Fest Filter-Pro® beskyttelseshette

- Sett Filter-Pro® beskyttelseshette på sprøyten og se til at den sitter godt. [fig 6]

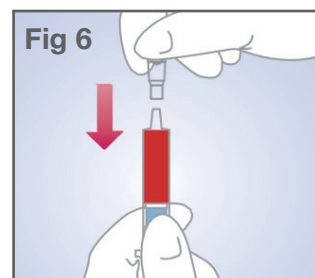


### 7 Fjerne luftbobler

- Hold sprøytens Luer-ende oppover og knips på sprøyten for å flytte eventuelle luftbobler til toppen av sprøyten. [fig 7]

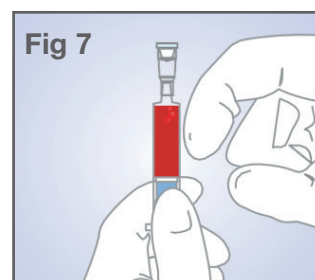

### 8 Aktivere Filter-Pro® beskyttelseshette

- Fjern luftbobler fra sprøyten gjennom langsomt å føre stempelet oppover. Stopp å skyve stempelet når prøven fukter filteret. Ved kontakt med blod forsegles filteret og Filter Pro® fungerer nå som transportlokk. [fig 8]
- Bland umiddelbart prøven med heparinet gjennom å vende hånden fram og tilbake i 20-30 sek.
- Blodprøven bør analyseres innen 30 minutter.

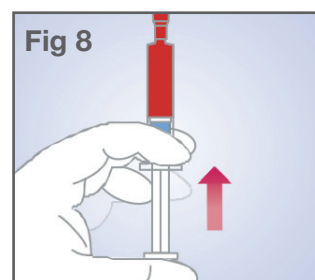

Se bruksanvisning for utfyllende informasjon som; indikasjon for bruk, kontraindikasjoner, advarsler og forholdregler.

MKEECA-0030

CE Rx  
0473 ONLY