





# Hvordan endre HbA1c enhet

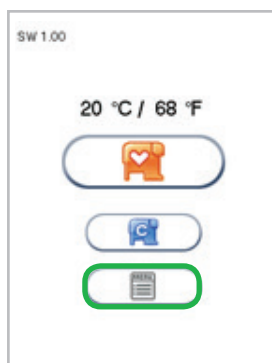

1. Fra oppstartsmenyen, trykk




for å åpne hovedmenyen.

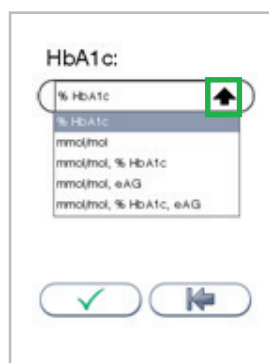

5. Trykk på pilen i vinduet for å se alternativene.

Rull ned til du finner ønsket valg.

- % HbA1c
- **mmol/mol**
- **mmol/mol, % HbA1c (begge enheter)**
- mmol/mol, eAG
- mmol/mol, % HbA1c, eAG

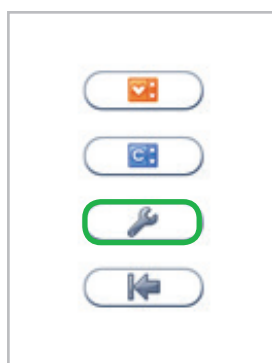


2. Trykk



for å åpne innstillingsmenyen.


**TIPS:** I en overgangsperiode kan det være hensiktsmessig å velge både ny og gammel benevnning, mmol/mol og % HbA1c.

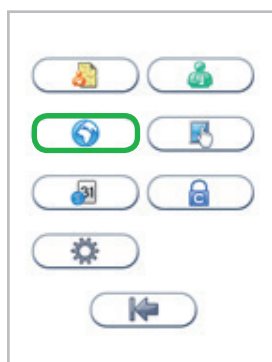

3. Trykk




for å åpne regionale innstillinger.

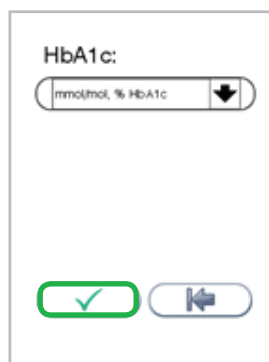

6. Trykk




for å godta og gå tilbake til innstillingsmenyen. Valgt benvnning vil nå vises ved analysing av HbA1c.

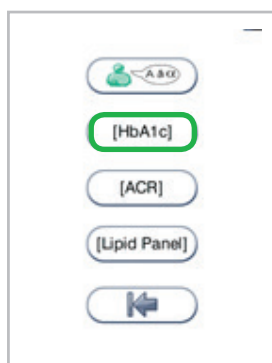

4. Trykk



for å velge HbA1c enheter.

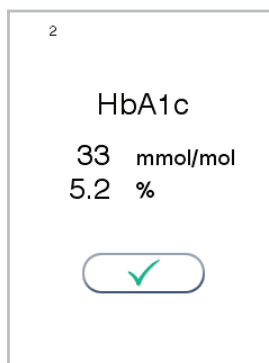

NB! Alle nye resultater vil lagres med ny(e) benevnning(er), men endringen har ikke tilbakevirkende kraft for allerede loggførte resultater.