





## Forklaring til skjemaet:

Dato	Test kit lot	Kontroll lot	Fasit Nivå 1	Målt verdi	Analyseresultater							Sign.		
					-6	-4	-2	0	2	4	6			
9/1-15	10120215	10119930	15-23	19					X					Amø
16/1-15	---- // ----	---- // ----	---- // ----	18				X						Amø

Trykt på siden av esken

Trykt på vedlegg og flaske

Se pakningsvedlegg

Sett kryss på streken. Midterste fasitverdi = 0

Alere Afinion CRP kontroll bør utføres ved hver nye forsendelse av Alere Afinion CRP, ved bytte av lot, og ved usikkerhet knyttet til et resultat.

Kontrollen bør analyseres minimum 1 gang per uke.

Fasiten står trykt på pakningsvedlegget.

Analysesultatene skal ved bruk av samme lot ligge stabilt i et område (gi en mest mulig rett linje i skjemaet). Dersom resultatene avviker mer enn tillatt, se feilsøking i pakningsvedlegget. Dersom feilen ikke finnes, ta kontakt med Alere.

## Oppbevaring:

### Uåpnede kontrollflasker:

Holdbare til utløpsdato angitt på etiketten når de oppbevares i kjøleskap (2-8°C).

### Åpnede kontrollflasker:

Holdbare i 4 uker når de oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Noter på etiketten datoen kontrollflasken åpnes. Åpnede kontroller skal oppbevares stående. Kontrollen kan anvendes direkte fra kjøleskap uten ekvilibrerings til romtemperatur.

### Vedlikehold av Alere Afinion:

Skjermen tørkes av med en myk mikrofiberklut. Testkassettkammeret rengjøres med en rengjørings spatel (art.nr. 1115269 / 1116048). Se Alere Afinion brukermanual.

### Åpnet Alere Afinion CRP kontroll er holdbar 4 uker i kjøleskap (2-8°C).

Dette skjemaet fås ved henvendelse til Alere, eller kan skrives ut fra [webshop.no.alere.com](http://webshop.no.alere.com)